


Live Aid

Bone Wave
骨ウェーブ

手首測定タイプ

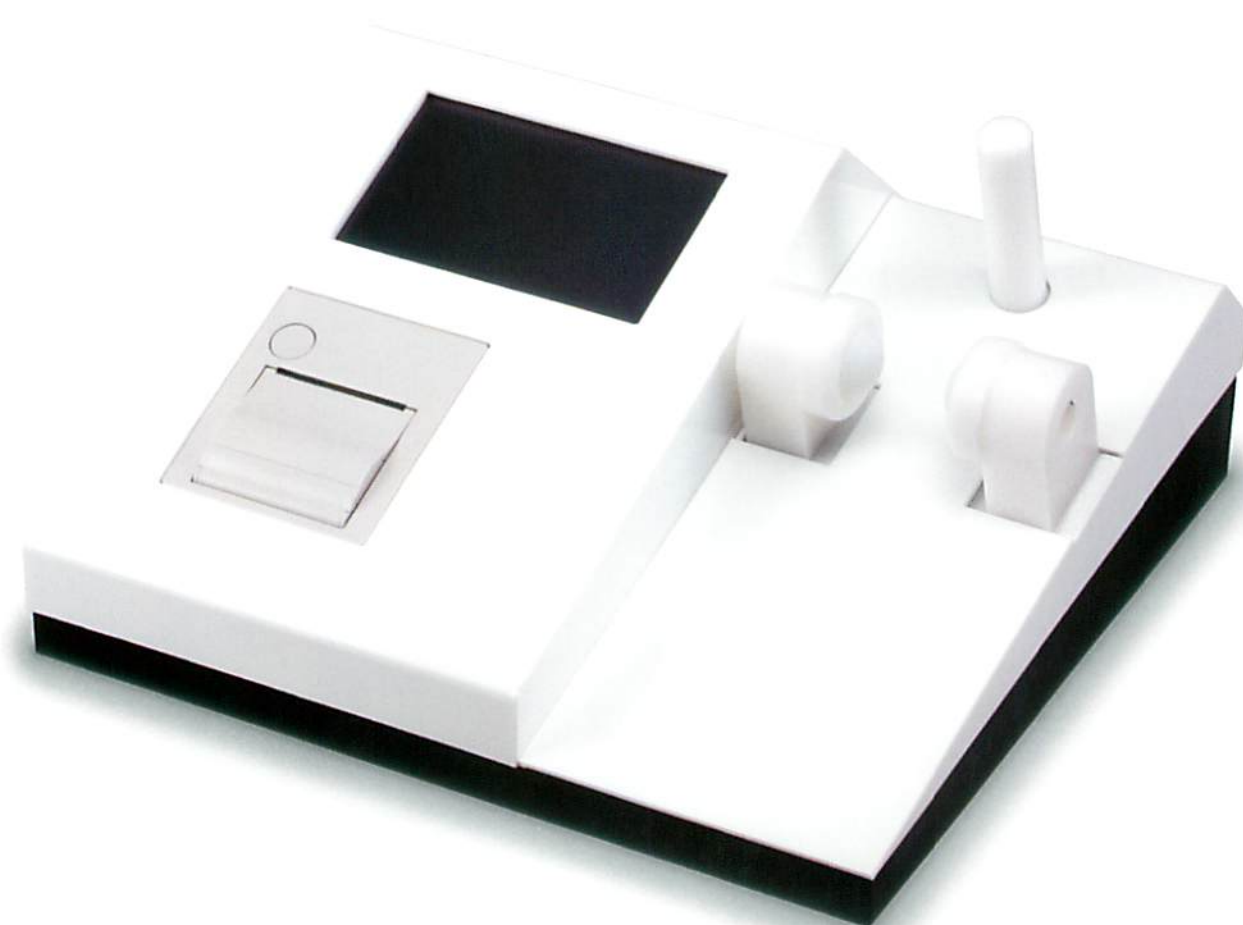

早い・簡単・コンパクト ～ 骨のセルフチェックに～

－ この商品は医療機器ではありません －

早い・簡単・コンパクト・経済性・拡張

■短時間で骨のセルフチェック

靴下やストッキングなどを脱ぐ必要がない手首での測定です。
どなたでも気軽に測定していただけます。

■タッチパネルモニターで簡単操作

10キーにより簡単に操作ができます。

■コンパクトなデザイン設計

容易に持ち運びが可能で、機能的に設計されています。

■優れた経済性

従来品に比較して安価となり、導入がし易くなりました。


■優れた拡張性

データを保存することが可能です。



■納入先のご提案

エステサロン、リラクゼーションルーム、温浴施設、フィットネスクラブ、薬局、接骨院、保健
組合保健センター、スポーツジム、病院、予防検診機関、公共施設など

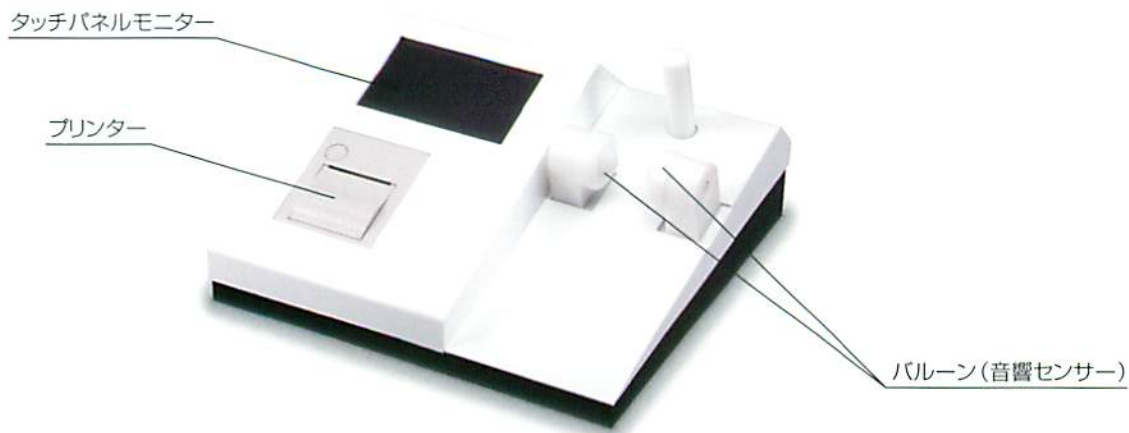

■消耗品




■機器構成

- 装置本体
- 音響センサー、バルーン
- サーマルプリンター
- タッチパネルモニター
- 電源ケーブル

■仕様

測定部位	手首
表示内容	判定(A~D)、コメント
測定時間	約20秒
設置	温度10~35(°C) / 湿度80%以下
電源	AC100V 50/60Hz
寸法	405W×383L×196H(mm)
重量	9.5(kg)

■寸法図(mm)

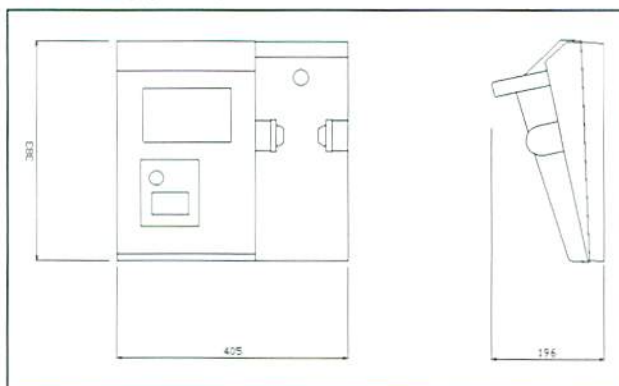

- ※ コインタイプもオプションでご用意できます。
- ※ 商品の外観仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。
- ※ このカタログ内容は2007年1月現在のものです。

測定器の総合商社

SP 株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com> <http://satotech.com>

販売店：

操作性で現場のニーズにお応えします。

測定手順

あなたの骨、大丈夫？
簡単にチェックできます
測定してみませんか？

「スタート」を押してください

スタート

性別と年齢を入力してください。
よろしければ、「次へ」を押してください。

骨男	骨女	男性
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	クリア	次へ

手首にスプレーを吹きつけ、バーを握ります。
準備ができたなら、「次へ」を押してください。



戻る **次へ**

結果 B

健康な方に多い、標準的な骨波形と見えます。

今の生活習慣で特に問題ありません。これからも、この調子で継続しましょう！

骨の健康3要素は、カルシウム、日光浴、運動です。



印刷結果

2006.11.17

骨WAVE測定結果

性別： 男性
年齢： 34歳


あなたの結果は？

BC値 = 1620

結果 = **B**

骨ウェーブ結果

良



コメント：

健康な方に多く、特にその中でも優れた骨波形と言えます。今の生活習慣を維持して健康に過ごしましょう。

測定日です。

性別：被験者の性別です。

年齢：被験者の年齢です。

骨ウェーブ測定値：波形の測定値です。

骨ウェーブ結果：
測定値から結果を表示します。
結果はA～Eの5段階です。（コメントは複数あり）

コメント：
結果の説明と、簡単なアドバイスを表示します。