

# 臨床屈折計

第3種医療機器製造販売業許可  
許可番号 13B3X00006

ATAGO®

病院の臨床検査室で  
医院・診療所で  
病院の入院病棟(泌尿器科)で  
救急・時間外診療時の検査において  
尿の濃さの管理・チェック時に

## ■尿比重目盛

1979年に日本臨床病理学会標準化委員会(J.S.C.P.)で作成された目盛を採用しています。  
※尿以外の液体の比重値とは一致しませんので、ご注意ください。

## ■血清蛋白目盛

1962年に実に1400人もの検体をもとにビューレット法との比較によって算出された換算式(東京女子医大:松村教授)によって作成しています。



高精度!



## デジタル尿比重計 UG-D Cat.No.3451

デジタル表示式の尿比重屈折計です。簡単な操作で誰にでも手軽に正確に測定ができます。測定方法は、ボディ上部にあるプリズム面にサンプル(尿)を滴下し、スタート・スイッチを押すだけです。約3秒後に測定値(尿比重値)が表示されます。

測定範囲: 尿比重 1.000~1.100 (自動温度補正)

最小表示: 尿比重 0.001

測定精度: ±0.001

温度補正範囲: 10~35°C

電源: 006P乾電池 (9V)

防水保護等級: JIC-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64

寸法・重量: 17×9×4cm, 300g (本体のみ)

価格: 100,000円 (税別)

### 測定方法



1 サンプルを1滴プリズム面に滴下します。



2 スタート/オフ・スイッチを押します。



3 約3秒後、測定値を表示します。

## ポケット尿比重屈折計 PAL-09S Cat.No.4409

プリズム面にサンプル(尿)を滴下し、スタート・スイッチを押すだけで簡単に尿比重をデジタル表示します。わずか、11センチのコンパクトサイズで、測定時間はわずか3秒、測定後は水で洗い流すことができます。

測定範囲: 尿比重 1.000~1.100 (自動温度補正)

分解能: 尿比重 0.001

測定精度: ±0.002

温度補正範囲: 10~35°C

電源: 単4アルカリ電池 2本

防水保護等級: JIC-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65

寸法・重量: 5.5×3.1×10.9cm, 100g (本体のみ)

価格: 29,800円 (税別)

水で丸洗いOK!  
片手で持てて  
携帯に便利!



測定器の総合商社  
株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

☎ (044) 738-0622 FAX (044) 738-0623

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

ホームページ: <http://www.ureruzo.com/> 測定器販売のサトテック: <http://satotech.com/>