

ポケット犬猫尿比重屈折計

# PAL-犬猫尿比重

Cat. No. 4529




※実物大



犬猫の尿比重をカンタン・安全に測定できます。表示はデジタルで見やすく、重さはわずか100gです。操作は片手でOKなのでどこでも気軽にお使いいただけます。

## 特徴

- 水で基準合わせが可能
- 水で丸洗いでできる防水仕様(IP65)
- 測定時間はわずか3秒
- 保管用ケース付き
- 携帯に便利なストラップホルダー付き
- 電池残量表示機能付

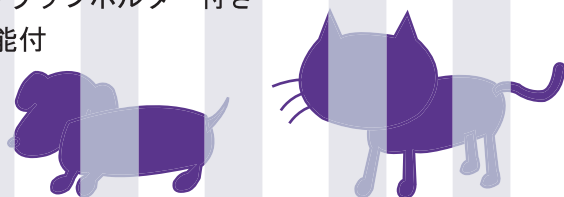

## 主な仕様

測定範囲	尿比重(犬) 1.000~1.060 (自動温度補正) 尿比重(猫) 1.000~1.080 (自動温度補正)
分解能	尿比重 0.001
測定精度	尿比重 ±0.001
温度補正範囲	10~35℃
使用環境温度	10~35℃
電 源	単4アルカリ電池×2本
電池寿命	約11,000回測定(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級	JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
寸法・重量	5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

## 測定方法



①プリズム面にサンプルを滴下します。

②STARTキーを押します。

③約3秒後に尿比重を表示します。

## 目盛について

主に米国で用いられている犬用、猫用の尿比重目盛を採用しています。犬尿を測定する場合は-dの目盛、猫尿の場合は-Cの目盛に切り替えてください。STARTキーの長押しで切り替えができます。

※尿以外の液体の比重値とは一致しませんのでご注意ください。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

**HACCP GMP GLP**

アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適合できます。

**株式会社 アタゴ**

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)  
TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137  
http://www.atago.net/ eigyo@atago.net  
工場/埼玉県大里郡寄居町藤田80 修理サービス部(修理窓口)  
TEL: 048-581-8063 FAX: 048-581-7792

**ATAGO U.S.A., Inc.** (アメリカ支社)

12011 NE First Street, Bldg. C, Suite 110, Bellevue, WA 98005 U.S.A.  
TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110 customerservice@atago-usa.com

**ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.** (インド販売社)

A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India  
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164 customerservice@atago-india.com



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

測定器の総合商社  
**SP 株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622  
FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satotech.com